

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: <u>301250</u>
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: <u>2020年4月9日</u>
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: <u>1.0</u> Hr
顧客名	広島中央健診所 様		TEL 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10		ご担当 宮田 様
販売店	(株)エバルス 様		ご担当 末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ <u>3</u> 年 <u>5</u> 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検			分解	有 ☒ 無 ☐
			給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	<u>ポンプノズル 長→短に変更</u>

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ <u>325</u>	エアライン	正常 ☒ <u>33-34</u>
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>396</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.69</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver <u>207 / 705c</u>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
---------------------------	--

装置	交換後運転回数: <u>1.612</u>	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: <u>6.448</u>	殺菌/消毒+アル: <u>1.964</u>
情報	リークチェック: <u>4.289</u>	自己洗浄: <u>648</u>	アルコール単独: <u>120</u>	エア単独: <u>2</u>

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No <u>17022647</u>	☒		濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No <u>15/204-001</u>	☒		水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。	
ご署名 <u>宮田 虎子</u>	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本