

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300608
作業年月日	2019 年 10 月 11 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	はしもと内科 様		TEL:	082-244-5577
所在地	広島市中区吉島東1-27-20		ご担当	様
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当	藤本 様
納入年月日	2015 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検 (KD-30も含む)

1セットのパラメータ初期値の義

排水水
分解 あり

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

・KD-30.フィルタ.交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・特記事項はなしでした。

装置	交換後運転回数: 595	更新 (1セット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 66	殺菌/消毒+7L: 2.861
情報	リークチェック: 2.092	自己洗浄: 1.105	アルコール単独: 6	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☒	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

沖田 裕美

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本