

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 5月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号: 100652
作業年月日	2020年 5月 8日	作業時間: Hr
顧客名	神辺内科 様	TEL: 084-925-2567
所在地	福山市上町2-10-29	ご担当 様
販売店	福山医療器株式会社	ご担当 山口 様
納入年月日	2013年 3月 12日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7年7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
6/4 酸素圧力異常 x1 7/5 殺菌時給水異常 x1	
不具合原因、作業内容	
2020年定期メンテナンス実施	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 693
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
点検 交換 異常なく 完了致しました。	


装置情報	交換後運転回数: 523	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒: 1418	殺菌/消毒+7L: 2246
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1778	アルコール単独: 3	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ; 水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計	52002022	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ; チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

2020年 5月 8日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名  印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原