

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019年 10月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100463
作業年月日	2019 年 10 月 21 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	いとう内科クリニック 様		TEL： 0824-64-8880
所在地	広島県三次市東酒屋町354-9		ご担当 様
販売店	ティーエスアルフレッサ株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	2012 年 8 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2019年定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 573
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。オゾン水フィルタースケールがエリクサの
後日交換致します。

装置 情報	交換後運転回数： 541	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2914	殺菌/消毒+7L： 1419
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1778	アルコール単独： 963	エア単独： 46

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	総合水フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

元 年 10 月 21 日

ご署名 伊藤 雅浩

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原