

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300843
作業年月日	2020 年 5 月 29 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	日高内科医院 様		TEL:	082-872-3232
所在地	広島市安佐南区上安2-32-21		ご担当	様
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当	広瀬 様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- 水位低下異常 3/9 2回 3/10 2回 → 特に問題なし
- アルコール説明、エプーシ説明

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 275	エアライン	正常 ☒ 35-36
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 341
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	1°ロブ74	☒ Ver 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題等ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 233	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 52	殺菌/消毒+アル: 836
	リークチェック: 2	自己洗浄: 162	アルコール単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
ポン水濃度計	no.10090396	☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☐	1セット
オゾンセンサー	180425-001	☒	1	基盤		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 29 日

ご署名

阿部

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

青木