

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300112
作業年月日	2019 年 11 月 12 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	いしねファミリークリニック 様		TEL:	0848-60-6555
所在地	広島県三原市本郷南5-19-15		ご担当	様
販売店	五洋医療器株式会社 様		ご担当	奥永 様
納入年月日	2013 年 11 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

・分解なし
・PHSあり
・アルコール使用済み

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

① YAMADA
② TAKEBA
③ KAWAZIRI
④ GZF-XP260N
⑤ PCF-Q260AI

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・オゾン分解触媒交換、4ヶ月間は「グリーン」にしました。

装置	交換後運転回数: 455	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 2.75分	殺菌/消毒+アル: ☒
情報	リークチェック: ☒	自己洗浄: ☒	アルコール単独: 0	エア単独: ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター 新・旧		☐	1
メイン基板		☒	1	タッチパネル		☒	1
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石根

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本