

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号: 100726
サビ・スマニアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2020年6月5日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	齊藤医院 様	TEL: 08288-2-2838
所在地	山口県阿武郡阿武町大字奈古2860-1	ご担当 様
販売店	新鋭工業株式会社 (接) 様	ご担当 様
納入年月日	2013年5月21日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7年7回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
定期保守点検 (7年目)	有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒
		分解
		有 ☐ 無 ☒

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 540
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 若干破損	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☐
		プログラム ver	正常 ☒ Ver 01021 T030

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生せず、大変きれいになりました。御使用頂上を願っています。

装置情報	交換後運転回数: 99	更新 (リセット) 実施 ☒ / 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1270	殺菌/消毒+アル: 1294
	リークチェック: 0	自己洗浄: 290	アルコール単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17022650			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No 120801-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	山口県阿武郡阿武町大字奈古2860番地1 医療法人 齊藤医院 理事長 齊藤 瑛 ご署名 医師 齊藤 瑛
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
齊藤 瑛	齊藤 瑛