

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300869
サビ・スニアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年6月19日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	すまいる消化器病クリニック 様		TEL: 083-253-1388
所在地	山口県下関市古庄町 (一ノノ) 様		ご担当 様
販売店	(株)システム 下関支店 様		ご担当 田嶋 様
納入年月日	2016年 5月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) 無	シャワー (有) 無
保守点検 (4年目)	洗浄時給水異常 (P202)	分解 (有) 無

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 295	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 312
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ビビ有	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒ 次回交換
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生していません。大変きれいになりました。次回修理まで有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 704	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/1118	殺菌/消毒+アル: 1/1686
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1/122	アルコール単独: 54	エア単独: 642

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 杉原 重樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
杉原	杉原