

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301173
作業年月日	2020 年 6 月 30 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	福山城西病院 様		TEL: 084-926-0606
所在地	福山市西町2-11-36		ご担当 様
販売店	五洋医療器株式会社 様		ご担当 松山 裕彦 様
納入年月日	2017 年 5 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴		シャワー工程 有 洗浄分解工程 有	
特に問題等はございませんでした			
不具合原因、作業内容			
・下記部品交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 207	エアライン	正常 ☒ 35-36
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 497
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	18774 Ver.	☒ 0207/T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題等はございませんでした。一日の終わりに排水栓の掃除とあはれています。			

装置 情報	交換後運転回数: 78	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 40	殺菌/消毒+7L: 199
	リークチェック: 60	自己洗浄: 110	アルコール単独: 1	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計	51808018	☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☐	1セット
オゾンセンサー	151224-009	☒	1	基盤		☐	1

お客様ご確認署名欄	2020 年 6 月 30 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木