

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 12 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301071
作業年月日	2019 年 12 月 3 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	南原医院 様		TEL: 0893-26-0103
所在地	愛媛県大洲市八幡町甲 97-1		ご担当 様
販売店	四国エム・イー (株)		ご担当 様
納入年月日	2017 年 1 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 (有償) 水槽内黒い水垢の汚れを除去する。			
不具合原因、作業内容			
保守点検部品交換 濃度計周辺を清掃 ←			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 310	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 553
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
Ver. 0207 / TOSC ☐			
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
特に異常なし、大変宜しい。御使用頂上御座います。ありがとうございます。			

装置情報	交換後運転回数: 66	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+7L: 203
	リークチェック: 198	自己洗浄: 46	7L単独: 2	エア単独: 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R 1 年 12 月 3 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 佐々木 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	杉本