

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号:	300844
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日:	2020年7月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間:	10 Hr
顧客名	野村病院 様				TEL	082-875-1111
所在地	広島市安佐南区祇園2-42-14				ご担当	加勢田 様
販売店	(株)中村酸素 様				ご担当	南部 様
納入年月日	2016年5月13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検			分解	有 ☒ 無 ☐
			給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・「7147770」(VSB)

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ X15
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒ 33-34
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 332
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラムver	正常 ☒ Ver 02071 T02c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・特別点検等には対応していません。

装置情報	交換後運転回数: 334	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 202	殺菌/消毒+アル: 1.175
	リークチェック: 2	自己洗浄: 1.806	アルコール単独: 23	エア単独: 37

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 14091904			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 191105-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 加勢田 隼人

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増田 淳	松本