

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 100258
サブ・スマニアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020年7月20日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	あわぜ内科クリニック 様	TEL:
所在地	甘日市佐方4丁目4-13	ご担当 様
販売店	藤井医療器(株) 様	ご担当 藤井社長 様
納入年月日	平成23年9月17日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒ ※日付修理記入	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有 ☒ 無 ☐	シャワー 有 ☒ 無 ☐
9.9パネル、基板 不具合		分解 有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
9.9パネル、基板、以下下記部品交換致しました。
プログラム Ver. も更新 されております。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 302	エアライン 正常 ☒ 33-34
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 862
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラム Ver 正常 ☒ Ver 0209 / 705C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
試運転等 問題なく 完了 致しました。

装置	交換後運転回数: 2	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 12	殺菌/消毒+アル: 10
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 18083227			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 191015-014			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 丸本佳代子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木