

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	500261
作業年月日	2019 年 12 月 18 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	37 軒 病院		TEL:	0838-28-0121
所在地	山形県 秋田県 大井町 1723-1		ご担当	様
販売店	(株)アストロ 秋田営業所		ご担当	佐々木 様
納入年月日	2019 年 4 月 4 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
12/17 10:07 システムエラー E-2/2 1 12/18 15:07 O ₂ 圧力 " 2 200 2 9/7 9:11 原水圧力 " 209 1 10/5 10:26 O ₂ 圧力 " 2 200 2	
不具合原因、作業内容	
O ₂ 圧力交換 Ver. 0303/T11A システムエラー	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 766
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.24 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
4, 5, 157.0 0.1, 291.0	

装置	交換後運転回数: 458	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 166	殺菌/消毒+7L: 292
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 128	7L単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☒	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ 新・旧		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

