

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301249 右
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2020年8月27日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様
販売店	(株)エバルス 様	ご担当 末田 様
納入年月日	2017年8月24日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 調整 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・オゾン水生成注意が頻発	5/25 26/1 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31	分解	有・無	
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容	
・酸素量の調整 (レギュレータ)	水道 280
	生成TIME: 91秒 → 68秒

点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラムver 正常 ☐ Ver /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	総合保守 無償

装置	交換後運転回数: 1.154	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 2.332	殺菌/消毒+アル: 2.335
情報	リークチェック: 8.606	自己洗浄: 2.30	アルコール単独: 1.30	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	
ご署名	宮田 恵子