

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☒	Ver. 3.1	製造番号: 300160
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2020年9月10日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	山内病院 様				TEL: 0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40				ご担当 様
販売店	株式会社アイコーメディカル 様				ご担当 山本 様
納入年月日	2013年12月9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7年7回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無	シャワー ☒ 有・無
定期保守点検	排水異常 E:111 → 8月30日迄	分解 ☒ 有・無

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 360	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 464
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☐ 破損	殺菌チューブ類 正常 ☐ 洗浄3分20秒、臭気無し
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver Ver 0204/ T02BLV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
トレイ破損、パルス計とその他異常にて修理完了。

装置情報	交換後運転回数: 510	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1/122	殺菌/消毒+アル: 1/821
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1591	アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51907246			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 160129-006			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 岡村 梨枝

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
岡村	梨枝