

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200226
発行日： 2020 年 2 月 26 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500226
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 2 月 26 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	前原病院 様	TEL: 084-925-1086
所在地	広島県福山市手城町1丁目3-41	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
令和 2 年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残 3.5MPa (差)	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 953
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒ 蛇口継手水洩れ X	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
※ 接続部がサビており、こで拭いたら洩れなくなりました。	

装置 情報	交換後運転回数: 171 → 1	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 8 / 7	殺菌/消毒+7H: 164 / 164
	リークチェック: 0	自己洗浄: 157	7H-1単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 51811074			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☒ 1
No 140402 - 003			接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤