

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300375
サビ・スミアブル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020 年 10 月 8 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	香浦医院 様	TEL: 0833-41-5225
所在地	山口県下松市王野屋西 1-5-17	ご担当 様
販売店	テニス365 (株) 様	ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
定期保守点検	有 ☒ 無 ☐	有 ☒ 無 ☐
		分解
		有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
下部部品の交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 300	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 483
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラム ver 0207 / 702C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
約に異常ございました。大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。

装置情報	交換後運転回数: 104 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 120	殺菌/消毒+アル: 1910
	リークチェック: 4 自己洗浄: 242	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量
オゾン水濃度計	☒ 1	オゾン分解触媒	☒ 1	マニホールドチューブ	☐ 一式
交換後No 16122546		濃度計フィルター	☒ 1	排水フィルター 旧・新	☐ 1
オゾンセンサー	☒ 1	排水栓	☒ 1	給水フィルター	☐ 1
No 151109-021		水槽側コネクタ	☐ 2	基板	☐ 1
	☐	チューブ側コネクタ	☐ 2	タッチパネル	☐ 1
	☐	吸盤	☒ 3		☐

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 香浦 信太郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
瑞 保	拓 雄