

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200306-01

発行日： 2020 年 3 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300881
作業年月日	2020 年 2 月 28 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	徳山病院 様	TEL： 0834-21-3750
所在地	山口県周南市新宿通り1-16	ご担当 様
販売店	富士フイルムメディカル株式会社 山口営業所	ご担当 澤久 様
納入年月日	2016 年 5 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張 ☒	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ウォッシングアップ中から立ち上がらない（オゾン水濃度計不具合）

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 613
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐	Ver. 0207/T02C		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ウォッシングアップ中から立ち上がらない原因は、オゾン水濃度計不具合によるものでした。

定期保守点検に含まれる部品の為、保守作業実施にて対応。その他特に異常はございませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 1384 更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌/消毒： 1274	殺菌/消毒+アル： 527
	リークチェック： 1 自己洗浄： 179	アルコール単独： 81	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	トレイ		☒	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

西田 留子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

松本

Ver.3.1