

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 500253
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2020年3月3日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	兼清外科 様	TEL: 0833-71-0800
所在地	山形県花巻市浅沼 3-1-25	ご担当 様
販売店	海峽医科器械(株) 周南営業所 様	ご担当 高尾 様
納入年月日	2019年3月29日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年/回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
定期保守点検 (初年度サービス)	E207 王成 異常	分解 ☒ 有・無
	E200 陳静 異常	洗浄 ☒ 有・無

不具合原因、作業内容
下記部品交換, プログラム更新, 給水パイプ-取外し.

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 331	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 525
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0304 / TAA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常はご指摘ありませんでした。交換した部品は御使用頂いております。

装置情報	交換後運転回数: 67	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 31	殺菌/消毒+アル: 641
	リークチェック: 60	自己洗浄: 7	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 14081874			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140407-003			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	洗浄ポイント	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 兼清 様

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
高尾	高尾