

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号:	300112
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日:	2020年12月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	いしねファミリークリニック 様	TEL	0848-60-6555
所在地	三原市本郷南5-19-15	ご担当	様
販売店	五洋医療器株式会社 様	ご担当	奥永 様
納入年月日	2013 年 11 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
・保守点検	有・無	有・無
X. 水圧 0.9 mpa.	給水圧 1.0 mpa	分解 有 (無)
高圧洗浄!	O2 圧力 "	給・排水F 有 (無)
		11/25/27 排水

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・F2-7 排水管外周塗装、修理 (説明済)
・P.L. コール未使用
・F2 708-X77 (白) 取替

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 342
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 水圧 0.9 mpa (水圧計)
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒ 35
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 420
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 02071 ToXc

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・排水圧ハウジング取外し。F2-7 取付方法を確認した。

装置	交換後運転回数: 412	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 3.165	殺菌/消毒+アル: 1
情報	リークチェック: 32	自己洗浄: 47	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 1321635			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 170321-003			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	X77 (白)	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

山田美和

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本