

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019年 4月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号： 301468
作業年月日	2019 年 4 月 8 日			作業時間： 1 Hr
顧客名	やまもと内科クリニック			様
所在地	広島県広島市東区牛田本町6-1-27-5F			ご担当 藤本 様
販売店	藤井医療器株式会社			ご担当 藤本 様
納入年月日	2018 年 4 月 2 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 / 回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他 ☐
定期点検・修理記入 ☒				
修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H31年定期メンテナンス実施（初回サービス）
来年より有償となります。（¥70,000-税別）

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チャージ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 351	更新（リセツト）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 73	殺菌/消毒+7L： 278
	リークチェック： 349	自己洗浄： 201	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用7L用		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019 年 4 月 5 日

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL：082-275-0740

責任技術者

増原

作業者

増原