

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300/85
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年4月6日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 2.0 Hr
顧客名	藤井循環器内科 様				TEL 252-0133
所在地	広島市南区中品2-14-24				ご担当 三宅 様
販売店	藤井医務器 (44) 様				ご担当 金泉 様
納入年月日	2018年 / 月 / 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検	1. 7月異常発生		分解	有・無
	1/5, 2/10, 3/16		給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	室内移動 (給・排水ホース取り替え)
	LED、サイロパネル交換、ボルト・ナット交換 (7ヶ所)

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
----------------------------	--

装置	交換後運転回数: 2/5	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 2632	殺菌/消毒+アル: 299
情報	リークチェック: 7	自己洗浄: 883	アルコール単独: 10	エア単独: 27

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 15011999			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140610-011			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用致しません。	
ご署名	三宅 愛

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本