

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301469
作業年月日	2020 年 4 月 10 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	高山内科病院 様		TEL: 0898-22-7720
所在地	愛媛県今治市大正町 3-5-8		ご担当 様
販売店	(有) テクノメディア		ご担当 戸田 様
納入年月日	2018 年 4 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

下記部品交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 594
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	70V 70V		☒ Ver. 0207 / 703C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換した部品は殺菌槽内に取り付けられています。
新しい異常は発生していません。

装置情報	交換後運転回数: 99	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 15	殺菌/消毒+7L: 154
	リークチェック: 0	自己洗浄: 145	7Lコル単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	7122961	☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー	152019-006	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 4 月 10 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
田中	田中