

## 保守点検・修理 報告書

|           |                                                                                                                            |                                                                       |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機器名       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Ver. 3.1                                                              | 製造番号: 100373     |
| サービスマニュアル | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                                                              | Ver. 3.1                                                              | 作業日: 2020年4月13日  |
| Ver (版番号) | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                       | Ver. 1.0                                                              | 作業時間: 1.0 Hr     |
| 顧客名       | 木下クリニック 様                                                                                                                  |                                                                       | TEL 082-231-3393 |
| 所在地       | 広島市西区観音本町2-3-1                                                                                                             |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店       | 藤井医療器(株) 様                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 和田 様         |
| 納入年月日     | 2012年3月28日                                                                                                                 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8年8回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取     | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>     |                                                                       |                  |

|            |      |                                                                  |       |     |
|------------|------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 | 有・無                                                              | シャワー  | 有・無 |
| ・保守点検      |      | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> | 分解    | 有・無 |
|            |      |                                                                  | 給・排水F | 有・無 |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 不具合原因、作業内容 |                             |
| ・下記部品交換    | (金具ロケータ) 説明、エプロン説明<br>副送水 " |

| 点検項目     |                                        |            |                                                        |
|----------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 32-33      |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 401             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm     |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 1917番まで         |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールドチューブ | 正常 <input type="checkbox"/>                            |
|          |                                        | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 01071 To1.A |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 | ・4時14分頃等には終了してました。 |
|----------------------------|--------------------|

|      |              |                  |             |                 |
|------|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 177 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 138  | 殺菌/消毒+アル: 1.5x5 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 425        | アルコール単独: 12 | エア単独: 1         |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 18023087 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 121024-024  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input type="checkbox"/>            | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| お客様ご確認署名欄                        |         |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |         |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 |         |
| ご署名                              | 木下クリニック |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 増原    | 松本  |