

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300544
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020年4月2日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	古江駅前内科医院 様	TEL 082-273-1211
所在地	広島市西区古江新町3-7 新本ビル2F	ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様	ご担当 松岡 様
納入年月日	2015年4月20日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無 ☐ シャワー ☒ 有・無 ☐
・保守点検	排水注意 多発 分解 ☒ 有・無 ☐
	3/10 消毒時給水異常 給・排水F ☒ 有・無 ☐
	3回

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
※ 送水ホースと排水ASSを取り外しての。経路観察、修理。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 269	エアライン 正常 ☒ 35-34
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 370
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0205/702C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・特記事項等は記入してください。

装置	交換後運転回数: 669 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 800	殺菌/消毒+アル: 2330
情報	リークチェック: 0 自己洗浄: 1277	アルコール単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11080767			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No 140319-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

福田 和美

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本