

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号:	301327
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日:	2020年4月4日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	力田病院 様		TEL	082-277-2101
所在地	広島市西区鈴が峰町14-20		ご担当	様
販売店	株式会社中村酸素 様		ご担当	堀内 様
納入年月日	2017年11月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無	シャワー ☒ 有・無
・保守点検	4/3 消毒時給水異常 2回	分解 ☒ 有・無
	5/16 " 1回	給・排水F ☒ 有・無
	6/13 排水水異常 2	

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
特に問題ありませんでした。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 546
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
上記の項目全てチェック交換完了しました。

装置	交換後運転回数: 14	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 2	殺菌/消毒+アル: 42
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 28	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18013000			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140623-016			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 柏原 弘典

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	増原
作業者	松本