

管理 No. 2020045-01

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号:	301203
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日:	2020年4月15日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間:	1.0 Hr
顧客名	祇園わだ内科クリニック 様				TEL	082-874-2777
所在地	広島市安佐南区祇園3-13-28				ご担当	様
販売店	株式会社セイエル 様				ご担当	田内 様
納入年月日	2017 年 3 月 13 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3 年 3 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ シャワー	有 ☒
・保守点検		分解	有 ☒ 無 ☐
		給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・分解なし変更 (床下排水) 時の確認

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・4月15日(水)12:30~13:30 作業完了

装置情報	交換後運転回数: 1842	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1965	殺菌/消毒+アル: 2229
	リークチェック: 4/10/1	自己洗浄: 868	アルコール単独: 193	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10090420			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140627-007			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 杉原

修理業者	新鋭工業 株式会社 広島支店 広島県広島市西区庚午中4-10-36 TEL : 082-275-0740	責任技術者	増原	作業者	松本
------	--	-------	----	-----	----