

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300822
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年4月21日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	吉野内科 様			TEL: 089-979-5123
所在地	愛媛県松山市平田町19-2			ご担当 様
販売店	大和商事 様			ご担当 仙波 様
納入年月日	2016年3月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
定期保守点検	(有) 無	(有) 無
	排水注意	分解 (有) 無

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 278	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 398
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 202 / T22C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生しませんでした。大変スムーズに作業完了しました。

装置情報	交換後運転回数: 215	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1/56	殺菌/消毒+アル: 1/894
	リークチェック: 978	自己洗浄: 658	アルコール単独: 4	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10050201			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120920-009			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 富永幸子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増 良	新 規