

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300261
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021 年 1 月 5 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: Hr
顧客名	にれえ クリニック 様	TEL: 084-931-3223
所在地		ご担当 様
販売店	福山医療器株式会社 様	ご担当 高田 様
納入年月日	2014 年 4 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有 ☒ 無 ☐	シャワー ☒ 無 ☐
定期点検 9.4パネに基板交換 原水汚染異常		分解 ☒ 無 ☐ 床下排水口無いた 変更済です。

不具合原因、作業内容
下記部品交換 (プログラム更新済)

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 759
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0209/T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
交換後、特に問題等ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 1	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 10	殺菌/消毒+アル: 11
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16042299			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140227-006			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3	鉛字キーボード	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 西江 学

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木