

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-01201-01

発行日: 2020 年 12 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500458
作業年月日	2020 年 12 月 14 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	藤本医院 様	TEL: 0848-23-2424	
所在地	広島県尾道市栗原町9650-4		ご担当 様
販売店	尾道医療器株式会社	ご担当 赤木 様	
納入年月日	2019 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E201, E403, E203. 各1回

不具合原因、作業内容

2020年度定期保守点検作業実施

710734更新

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 784
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

4年12月問題ございません

装置 情報	交換後運転回数: 73	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 61	消毒 (洗剤洗浄あり): 60
	消毒+アル (総運転回数): 15		消毒+アル (洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 70	アルコール単独: 0	エア単独: 55

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ 側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2 年 12 月 14 日

ご署名 307 井 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者