

## 保守点検・修理 報告書

|           |                                                                                        |                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 機器名       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> Ver. 3.1                                  | 製造番号: 300441                                                              |
| サービスマニュアル | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 3.1                      | 作業日: 2021年1月19日                                                           |
| Ver (版番号) | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/> Ver. 1.0                          | 作業時間: 1 Hr                                                                |
| 顧客名       | 三田病院 様                                                                                 | TEL: 0835-22-1110                                                         |
| 所在地       | 山口県防府市お茶屋町3-27                                                                         | ご担当 様                                                                     |
| 販売店       | (特) 特殊メス商会 様                                                                           | ご担当 様                                                                     |
| 納入年月日     | 2015年2月2日                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品 |
| 作業区分      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6年6回目           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| 出張・引取     | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                           |

|            |                                                                       |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | シャワー <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |
| 定期保守点検     | 2/10, 2021                                                            | 分解 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |

|            |         |
|------------|---------|
| 不具合原因、作業内容 | 下記部品の交換 |
|------------|---------|

| 点検項目     |                                            | 交換部品名称     |                                                    | 交換 | 数量 |
|----------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----|----|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 368 | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 594    |    |    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |    |    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 清掃       | 正常 <input type="checkbox"/>                | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |    |    |
|          |                                            | プログラムver   | Ver 0207 / T02C                                    |    |    |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 | 特に異常はございませんでした。大変スムーズに御役所へお見えになりました。 |
|----------------------------|--------------------------------------|

|      |               |                                                                               |              |                 |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 995  | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | 殺菌/消毒: 13032 | 殺菌/消毒+アル: 13637 |
|      | リークチェック: 2510 | 自己洗浄: 1238                                                                    | アルコール単独: 106 | エア単独: 2         |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換                                  | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ    | <input type="checkbox"/>            | 一式 |
| 交換後No 12112914 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター (旧・新) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input type="checkbox"/>            | 1  | 給水フィルター       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| No 160603-002  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 基板            | <input type="checkbox"/>            | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル        | <input type="checkbox"/>            | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  | 鉗子キャップ        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| お客様ご確認署名欄                                                           | ご署名 廣江 隼子 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 |           |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

|       |       |
|-------|-------|
| 責任技術者 | 作業者   |
| 堀江 隼子 | 堀江 隼子 |