

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 500449
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業日: 2020年2月11日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	新川胃腸科内科 様		TEL: 0827-23-7541
所在地	山口県岩国市中津町1-21-10		ご担当 様
販売店	(株)システム 岩国支店 様		ご担当 新田 様
納入年月日	2019年 11月 28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有)無	シャワー (有)無
保守点検 (初年度サービス)	E-302 濃度維持異常	分解 (有)無

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 293	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 828
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver Ver 0204/ TPA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生せず。大変スムーズに御使用頂いております。

装置情報	交換後運転回数: 283	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 14	殺菌/消毒+アル: 1280
	リークチェック: 0	自己洗浄: 013	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17052776	☒		濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター (Plus)	☒	1
No 131107-015	☒		水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 松本 玲子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増	松