

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☒	Ver. 3.1	製造番号:	100727
サビ・マニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日:	2020年5月3日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間:	/ Hr
顧客名	こたち胃腸科内科医院 様				TEL	0823-33-0292
所在地	呉市焼山中央1-5-25				ご担当	様
販売店	(有)平原商会 様				ご担当	西川 様
納入年月日	2013 年 5 月 27 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検			分解	有 ☐ 無 ☒
			給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 327	エアライン 正常 ☒ 33~34
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 593
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0107/103D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ございました。

装置	交換後運転回数: 237	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 101	殺菌/消毒+アル: 339
情報	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 2	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51904149			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 131204-012			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 小刀 武幸

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本