

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 : 500463
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日 : 2021 年 2 月 25 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 : / Hr
顧客名	比婆医院 様	TEL : 0824-72-1811
所在地	広島県広島県庄原市中本町1丁目3-1渡辺ビル1F	ご担当 様
販売店	株式会社エバルス 様	ご担当 様
納入年月日	2020 年 1 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有・無	シャワー ☒ 有・無
・保守点検	E105 E-9-異常	分解 ☒ 有・無

不具合原因、作業内容
・2021年度保守点検実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 780
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0303 / T/2A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等はありませんでした。マシンご使用に頂きありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数 : 98 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒 : 3 / 1	殺菌/消毒+アル : 98 / 98
	リークチェック : 90 自己洗浄 : 91	アルコール単独 : 1	エア単独 : 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18113385			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 160621-002			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3	水フタ+ヒューズ	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 渡辺 将史

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任技術者	増原
作業者	青木