

## 保守点検・修理 報告書

|           |                                                                                        |                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 機器名       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> Ver. 3.1                                  | 製造番号: 300/13                                                          |
| サビ・スマニアル  | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 3.1                      | 作業日: 2021年3月9日                                                        |
| Ver (版番号) | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/> Ver. 1.0                          | 作業時間: / Hr                                                            |
| 顧客名       | 原田 外科医院 様                                                                              | TEL: 0837-52-0756                                                     |
| 所在地       | 山口県美祿市大嶺町東分322-1                                                                       | ご担当 様                                                                 |
| 販売店       | ナデンケア 株式会社 様                                                                           | ご担当 花田 様                                                              |
| 納入年月日     | 2013 年 11 月 30 日                                                                       | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8 年 8 回目        | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取     | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

|            |      |                                         |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 | 有/無 <input checked="" type="checkbox"/> | シャワー | 有/無 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 定期保守点検     |      |                                         | 分解   | 有/無 <input checked="" type="checkbox"/> |

|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
| 下記部品交換     |

| 点検項目                                            |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 428      |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>               |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm       |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | マニホールドチューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                                 | プログラム ver 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0207/T04C |

|                                        |
|----------------------------------------|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項              |
| 特に問題等ございませんでした。いつもキレイにご使用頂きありがとうございます。 |

|    |               |                  |             |                 |
|----|---------------|------------------|-------------|-----------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 287  | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 1359 | 殺菌/消毒+アル: 11723 |
| 情報 | リークチェック: 2041 | 自己洗浄: 1373       | アルコール単独: 2  | エア単独: 3         |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 11010541 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 140320-003  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。                                                          |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。                                                          |
| ご署名  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 増原    | 青木  |