

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300734
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年3月11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	梶川病院 様	TEL 082-231-1131
所 在 地	広島市西区天満町8-7	ご担当 杉岡 様
販 売 店	小西医療器株式会社 様	ご担当 木戸 様
納入年月日	2016 年 2 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☐ 無 ☒ シャワー
・保守点検		分解 有 ☐ 無 ☒
		給・排水F 有 ☐ 無 ☒

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・USB 7" 702c

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 442	エアライン 正常 ☒ 34-35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 628
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 左上と右	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207/702c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・15分程度で完了。

装置 情報	交換後運転回数: 220	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 115	殺菌/消毒+7L: 1230
	リークチェック: 1270	自己洗浄: 676	アルコール単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18023070			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120801-036			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 杉岡 雅子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本