

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 301045
サビ・スミアール	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020 年 6 月 11 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	市診療所			TEL: 〆
所在地	愛媛県西予郡伊方町市 466			ご担当 0894-56-0032 様
販売店	(有) 大洲医療器械			ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
保守点検	有・無 ☒	有・無 ☒
		分解 ☒

不具合原因、作業内容
保守点検部品, インターコム基板(故障品)交換.

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 310
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 982
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 2019 / TOSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は発生していません。大変スムーズに作業が完了しました。

装置情報	交換後運転回数: 38	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 16	殺菌/消毒+アル: 123
	リークチェック: 104	自己洗浄: 36	アルコール単独: 0	エア単独: 24

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 (3.3V)	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16082480			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 141021-016			水槽側コネクタ	☒	2	基板 (故障品)	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 山口 浩正

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
山口 浩正	花 枝