

保守点検・修理 報告書

管理 No. 202006-01
発行日: 2020 年 6 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500321
作業年月日	2020 年 6 月 24 日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	いまだ内科医院 様		TEL	
所在地	広島県福山市神辺町大字川北324-1		ご担当	様
販売店	共和医理器株式会社		ご担当	白根 様
納入年月日	2019 年 6 月 11 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

※ 定期保守作業

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 879
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / r124

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません
70754 更新 Ver. 0304 / T12A

装置 情報	交換後運転回数: 447	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 118	消毒 (洗剤洗浄あり): 117
	消毒+アル (総運転回数): 330		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 328	
	リークチェック: 446	自己洗浄: 208	7Lコル単独: 5	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No.			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ側	☐		水フィルター	☒	1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1		☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 24 日
ご署名 今田 由二 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原