

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300545
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020 年 6 月 25 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	おおひの診療所 様			TEL: 083-922-0299
所在地	山梨県山梨市石観音町 4-4			ご担当 様
販売店	ティートン3677 (株) 様			ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	5 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒	
(出張・引取)	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有(無)	シャワー	(有) 無
保守点検			分解	(有) 無

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 300
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒ レビ有
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 397
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒ 次回交換
プログラム ver	正常 ☒ Ver 2051 702C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常は感じませんでした。酸素センサー残圧 2MPa 以下、不安定な値に使用項目を確認しています。

装置情報	交換後運転回数: 326	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/213	殺菌/消毒+7L: 1/238
	リークチェック: 1/233	自己洗浄: 1/185	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 13101581			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 141104-004			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 胡子あかね

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
嶋田 良	嶋田 良