

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 500261
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日: 2021 年 3 月 25 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間: / Hr
顧客名	河野医院 様	TEL: 0838-28-0321
所在地	山口県萩市大井 1723-1	ご担当 様
販売店	(株)アステム 萩支店 様	ご担当 佐々木 様
納入年月日	2019 年 4 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
定期点検実施 (初回サービス分)	4/24 E200 酸素計異常 2 5/28 8/5 8/24 E302 濃度値異常 7/2 オバーフロー異常	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容	下記部品交換、試運転実施
------------	--------------

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 899
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラム ver	Ver 0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に問題等ございました。オゾン水使用頂きありがとうございます。
----------------------------	---------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 1197	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 8091	殺菌/消毒+アル: 3931
	リークチェック: 110	自己洗浄: 328	アルコール単独: 2	エア単独: 377

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52009164			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140604-004			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
E316V9-	☒	1	チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
水76V9-	☒	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	石田久美
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	増原
作業者	柘植