

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号 : 100794
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業日 : 2020年7月7日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	原田医院 様	TEL 082-877-7581
所 在 地	広島市安佐南区川内4-15-18	ご担当 様
販 売 店	富士フィルムメディカル株式会社 様	ご担当 西川 様
納入年月日	2013 年 7 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐ シャワー	有 ☐ 無 ☒
・保守点検		分解	有 ☐ 無 ☒
		給・排水F	有 ☐ 無 ☒

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 807
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0107 / Tol.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・特記事項等ありません。

装置	交換後運転回数 : 77	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒 : 109	殺菌/消毒+アル : 1476
情報	リークチェック : 0	自己洗浄 : 1.822	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18073207			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 141031-003			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用致しません。

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増田	松本