

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 301071
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年4月6日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	南原医院 様	TEL: 0893-26-0103
所在地	愛媛県大洲市ハ多喜町甲97-1	ご担当 様
販売店	同国エー 様	ご担当 井上 様
納入年月日	2017年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) ☒ 無 ☐	シャワー (有) ☒ 無 ☐
起動時給水異常 (リーク、消毒、自己洗浄)	起動時給水異常 (201)	分解 (有) ☒ 無 ☐
(リーク、リーク、リーク、リーク)		

不具合原因、作業内容
1. 給水電磁弁 x 2 交換 (2020年12月1日の保守点検)
1. 水道圧 0.7 ~ 0.8 MPa の為、電磁弁作動せず

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 337	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 548
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラム ver Ver 02071 TOSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
下記部品の交換は完了、後日水道屋にて圧力調整をお願いいたします。

装置情報	交換後運転回数: 57	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1 8	殺菌/消毒+7L: 1258
	リークチェック: 251	自己洗浄: 19	アルコール単独: 4	エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52005186			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180122-008			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
給水電磁弁	☒	2	チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 郷内

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
郷内	郷内