

保守点検・修理 報告書

管理 No. 202007-02
発行日: 2020 年 7 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500336
作業年月日	2020 年 7 月 30 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	せら医院	様	TEL: 084-972-3355
所在地	広島県福山市加茂町下加茂993		ご担当 様
販売店	株式会社エパルス		ご担当 上田敬良 様
納入年月日	2019 年 7 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年度定期保守点検作業

プログラム更新

不具合原因、作業内容

E110, 207, 200, 201

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 945
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / 712A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 106 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒(総運転回数): 1 / 消毒(洗剤洗浄あり):	
	消毒+アル(総運転回数): 105	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 3	自己洗浄: 87	7Lコル単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 2
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
						☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 30 日

医療法人社団いなほ会
せら医院

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者