

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-202007-03
発行日: 2019 年 7 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500328
作業年月日	2020 年 7 月 31 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	得能クリニック	様	TEL: 0848-67-7711
所在地	広島県三原市宗郷1丁目3-12		ご担当 様
販売店	共和医理器株式会社		ご担当 碓本 様
納入年月日	2019 年 6 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2020年度定期保守点検作業実施			
プログラム更新			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 708
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
特に問題ありません。			

装置 情報	交換後運転回数: 49	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 1	消毒 (洗剤洗浄あり):
	消毒+アル (総運転回数): 49		消毒+アル (洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 20	自己洗浄: 45	7Lノール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続1ヶ所; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 得能正英	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	増原