

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	製造番号:	100455
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日:	2020年7月29日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間:	6.0 Hr
顧客名	山中クリニック 様	TEL	0820-72-0152
所在地	山口県大島郡周防大島町久賀5368-1	ご担当	様
販売店	三興医療品株式会社 様	ご担当	松本 様
納入年月日	2012年7月17日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 8年1回目 定期点検シール記入 ☐	出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
・オーバーホール			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・基板交換に伴いバージョンアップ

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒ 33-38
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 850
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ *本機内よりクリーニング	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒ *交換済	マニホールドチューブ 正常 ☒ *交換済
	プログラムver 正常 ☒ Ver 02091705c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・自己洗浄を判断下り。*槽内カビが少量付着にあり、対応。

装置情報	交換後運転回数: 1289 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 737	殺菌/消毒+7L: 840
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	7L単独: 3
			エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 51905169			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 15126-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

山本正治

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号:	100455
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日:	年 月 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間:	Hr
顧客名	山中クリニック 様	TEL	0820-72-0152
所在地	山口県大島郡周防大島町久賀5368-1	ご担当	様
販売店	三興医療品株式会社 様	ご担当	様
納入年月日	2012 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 8 年 1 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
・オーバーホール			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・基板交換に伴いバージョンアップ

点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールドチューブ	正常 ☐
		プログラムver	正常 ☐ Ver /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
メインポンプ	☒	1	マニホールドブロック	☒	1	オゾン発生装置	☒	1
排水ポンプ	☒	1	酸素電磁弁	☒	2		☐	
エアポンプ	☒	1	給水電磁弁	☒	2		☐	
排気ファン	☒	1	アルコールライン電磁弁	☒	1		☐	
ドレンバルブASSY	☒	1	配管パッキン・フタパッキン	☒	1		☐	
マニホールド電磁弁	☒	8	リークチェック配管	☒	1		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用致しません。
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本