

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300361
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年9月4日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	光市立大和総合病院 様			TEL: 0820-48-2111
所在地	山形県光市大字若田 974			ご担当 様
販売店	三興 医療品 (株) 様			ご担当 松葉 様
納入年月日	2014年10月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6年6回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
保守点検	有・無 ☒ 有	有・無 ☒ 有
	オゾン生成装置 F110	分解

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ X15	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 304
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 2.0L有	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☐
		プログラムver	Ver 0207 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
オゾン生成装置 → 酸素流量調整 その他異常なし。

装置情報	交換後運転回数: 1302 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1309	殺菌/消毒+アル: 13501
	リークチェック: 3764	自己洗浄: 1321	アルコール単独: 12
			エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 10050204			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 160201-005			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用致しません。
ご署名 行 松 平

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
瑞 原	松 平