

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 301328
サビ・スマニアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020 年 9 月 15 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	瀬尾 73ニッ7				TEL: 084-934-2233
所在地	福山市今津町 5-2-2				ご担当
販売店	ティースアルフレック 株式会社				ご担当 古川
納入年月日	平成 30 年 2 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
タッチパネル故障(左上のみ)			分解	有・無

不具合原因、作業内容
基板、タッチパネル交換 プログラム更新
試運転実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 680
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 0209 / T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
交換後試運転致しましたが、特に問題ございませんでした。

装置	交換後運転回数:	更新 (リセット) (実施・未実施)	殺菌/消毒:	/	殺菌/消毒+アル:	/
情報	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:		エア単独:	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 瀬尾 一史

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木