

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300888
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2020年9月18日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	古江クリニック 様	TEL 082-229-0331
所在地	広島県広島市東区戸坂中町6-8	ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 様	ご担当 吉原 様
納入年月日	2016年 7月 14日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒ シャワー ☒ 有・無 ☒
・保守点検		分解 ☒ 有・無 ☒
		給・排水F ☒ 有・無 ☒

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	分解有→無交換 水温 26℃

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 307	エアライン	正常 ☒ 35-37
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 590
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207/1020

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	・4月10日修理等がございまして。
---------------------------	-------------------

装置 情報	交換後運転回数: 66	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 7	殺菌/消毒+7L: 283
	リークチェック: 0	自己洗浄: 272	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 200310-001	☒	1	濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200310-001	☐		水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 村木 佑規子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本