

保守点検・修理 報告書

管理 No.

06202009-01

発行日: 2020 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500393
作業年月日	2020 年 9 月 17 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	東城病院	様	TEL: 0847-72-2150
所在地	庄原市東城川東1463-1		ご担当 様
販売店	福山医療器株式会社		ご担当 様
納入年月日	2019 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施

初回サービス (次回より¥78,000-掛かります)

プログラム更新

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 698
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございません

装置 情報	交換後運転回数: 294	更新 (リセット) ☒ 実施 / 未実施	消毒 (総運転回数): 40	消毒 (洗剤洗浄あり): 36
	消毒+アル (総運転回数): 256		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 255 (5分)	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 221	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 17052724			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
160226-006			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

増原