

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300362
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2020 年 10 月 日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	向井 77ニック 様	TEL: 0829-50-6166
所在地	広島県廿日市市前空 5-3-16	ご担当 院長 様
販売店	藤井医療器 株式会社 様	ご担当 政村 様
納入年月日	2014 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
定期保守点検実施	1/26~2/9 排水注ぎ 7回 1 前回履歴	分解 ☒ 有 ☐ 無 床下排水 排水フィルター 1枚

不具合原因、作業内容
下記部品交換 排水フィルター清掃

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 346	エアライン 正常 ☒ 33-34
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 487
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0204 / T02BV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題等ありませんでした。
キレイにご使用頂きありがとうございます。

装置	交換後運転回数: 423	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 17	殺菌/消毒+7L: 13244
情報	リークチェック: 265	自己洗浄: 120	アルコール単独: 4	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 51909279			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200511-005			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 向井 俊一

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木